

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
## Contacts

Pour toute question technique et pratique sur le système, nous restons disponibles au:



Ou consultez notre site: [www.telecardiologie.info](http://www.telecardiologie.info)

Pour trouver nos coordonnées à tout moment, vous pouvez conserver cette carte détachable:



# La Téléc@rdiologie<sup>®</sup> BIOTRONIK

Pour répondre aux questions que vous vous posez sur la Téléc@rdiologie<sup>®</sup>



## Vous êtes porteur d'une prothèse cardiaque BIOTRONIK équipée de la Téléc@rdiologie®

### Qu'est-ce que la Téléc@rdiologie®?

C'est un système automatique de transmission des données médicales et techniques de votre pacemaker ou de votre défibrillateur au cardiologue en charge de votre suivi. Les informations sont envoyées par l'intermédiaire d'un transmetteur, le CardioMessenger®, placé à moins de 2m de votre chevet.

### A quoi ça sert?

La Téléc@rdiologie® permet une collecte régulière d'informations de votre prothèse. Elle vérifie son bon fonctionnement, en fournissant des informations quant à l'état de la pile et des sondes. Elle donne des informations sur le rythme cardiaque et peut également permettre de vérifier l'efficacité d'un traitement (antiarythmique par exemple). Des événements qui peuvent devenir graves sont le plus souvent détectés avant la date de consultation programmée.

### Est-ce un système d'urgence?

Non. En cas d'urgence, vous devez appeler un médecin, le 15 (SAMU) ou le 112 (numéro d'urgence européen).

### Comment ça marche?

Une fois l'appareil branché sur le secteur, il est allumé et vous n'avez plus rien à faire. La transmission est entièrement automatique. La prothèse enregistre les données la journée et les transmet la nuit suivante.

### Est-ce dangereux pour la santé?

L'émetteur de l'appareil implanté a une puissance de transmission faible, qui n'est pas dangereuse pour la santé.



CardioMessenger Smart®

## Votre cardiologue vous remet un transmetteur appelé CardioMessenger Smart®.

### Où puis-je avoir des informations sur le système?

Un numéro vert est à disposition des patients et de leur famille pour toute question relative à la Téléc@rdiologie®, un site Internet est également disponible:



[www.telecardiologie.info](http://www.telecardiologie.info)

### Peut-on voyager avec le CardioMessenger?

La Téléc@rdiologie® fonctionne dans de nombreux pays. Il est préférable de s'en assurer et de prendre quelques précautions (être joignable par téléphone) en appelant le service Téléc@rdiologie® de BIOTRONIK: 0 800 801 034.

### Qui peut accéder aux données de la Téléc@rdiologie®?

Les données de la Téléc@rdiologie® sont disponibles sur un site Internet sécurisé. Le ou les médecins qui contrôlent votre pacemaker ou votre défibrillateur sont les seuls à analyser les données transmises.

### La Téléc@rdiologie® oblige-t-elle le cardiologue en charge du suivi à être disponible en permanence?

La Téléc@rdiologie® n'est pas un système de surveillance 24h/24. Il s'agit d'un système de télésuivi qui vient compléter les consultations médicales et les contrôles systématiques au centre de stimulation. Le médecin ne peut prendre connaissance du rapport reçu, évaluer les données et vous joindre qu'à ses jours et heures de travail. Il n'est pas tenu d'assurer une permanence à ce titre, et peut librement s'absenter du cabinet pour toutes raisons personnelles ou professionnelles, sans avoir à se faire remplacer, ni prévenir chacun de ses patients de ses jours et heures de travail.